



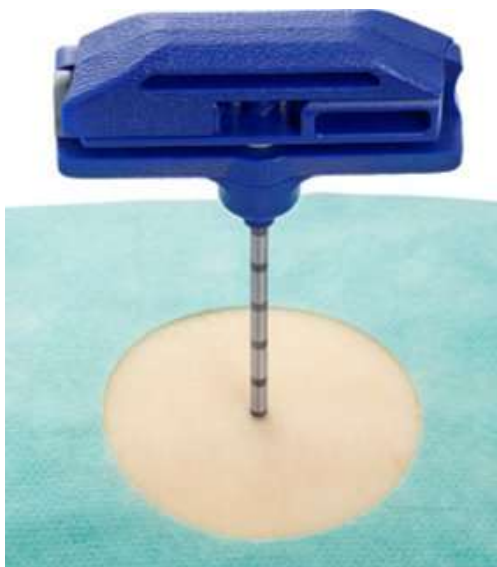

1. Przygotować miejsce biopsji, stosując sterylną procedurę. Wykonać małe nacięcie skóry skalpelem, aby ułatwić wprowadzenie igły SnareCoil® przez skórę.

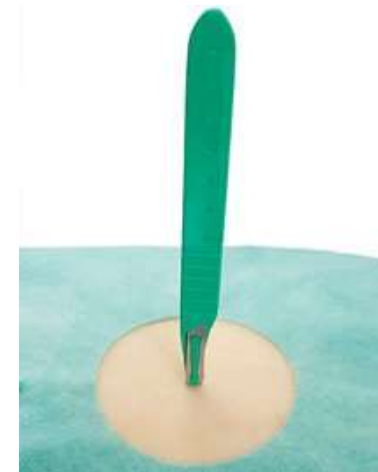

2. Trzymając mocno igłę SnareCoil®, wprowadzić ją przez skórę. Delikatnie, ale stanowczo naciskając, wprowadzić igłę SNARECOIL®, obracając ją na przemian zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wejście do jamy szpikowej jest zazwyczaj wykrywane przez zmniejszony opór.

3. Odblokować mandryn SnareCoil®, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 90°, a następnie delikatnie wyjąć mandryn z kaniuli.



4. Jeśli wymagana jest aspiracja, podłącz strzykawkę luer-lock lub luer-slip do piasty SnareCoil®.



5. Po zakończeniu aspiracji wyjąć strzykawkę, a następnie powoli i delikatnie wprowadzić igłę SnareCoil® na głębokość 2-3 CM do szpiku kostnego, wykonując ruchy zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do uzyskania odpowiedniej głębokości.



6. Delikatnie włóż oznaczony obturator/sondę do SnareCoil® w celu sprawdzenia długości próbki szpiku kostnego. Odległość od górnego oznaczenia na obturatorze/sondzie do piasty SnareCoil® wskazuje długość próbki.

7. Przesuń szarą dźwignię na SnareCoil® z pozycji "OPEN" do pozycji "CLOSED", aż poczujesz "kliknięcie". Aktywuje to mechanizm SNARECOIL®, blokując próbkę szpiku kostnego na miejscu.



8. Obróć SnareCoil® o 360°, aby oddzielić próbkę szpiku kostnego. Powoli i delikatnie usunąć igłę SnareCoil®, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.