


1. Przygotować miejsce biopsji, stosując sterylną procedurę. Wykonać małe nacięcie skóry skalpelem, aby ułatwić wprowadzenie igły Tweezer® przez skórę.

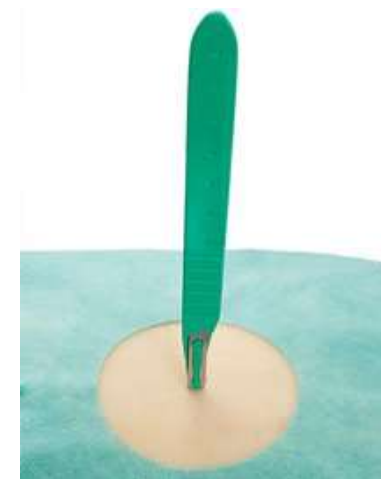

2. Trzymając mocno igłę Tweezer®, wprowadzić ją przez skórę. Delikatnie, ale stanowczo naciskając, wprowadzić igłę Tweezer®, obracając ją na przemian zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wejście do jamy szpikowej jest zwykle wykrywane przez zmniejszony opór.



3. Zdejmij mandryn Tweezer®, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 90°, a następnie delikatnie wyjmij mandryn z kaniuli.



4. Jeśli wymagana jest aspiracja, podłącz strzykawkę luer-lock lub luer-slip do piasty Tweezer®. Po zakończeniu aspiracji powoli i delikatnie wprowadzić igłę Tweezer® na głębokość 2-3 CM do szpiku kostnego, wykonując ruchy zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do uzyskania odpowiedniej głębokości.


5. Delikatnie wprowadzić oznaczony obturator/sondę do pęsety Tweezer® w celu sprawdzenia długości próbki szpiku kostnego. Odległość od górnego oznaczenia na obturatorze/sondzie do piasty kaniuli wskazuje długość próbki.



6. Całkowicie włożyć kaniulę ekstrakcyjną Tweezer® do igły Tweezer®.

WAŻNE: Nie obracać kaniuli ekstrakcyjnej Tweezer® podczas umieszczania jej w igle Tweezer®.

7. Obrócić igłę Tweezer® o 360°, aby oddzielić próbkę szpiku kostnego. Powoli i delikatnie wyciągnąć igłę pęsety Tweezer® i kaniulę ekstrakcyjną RAZEM, wykonując ruch obrotowy w kierunku zgodnym zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

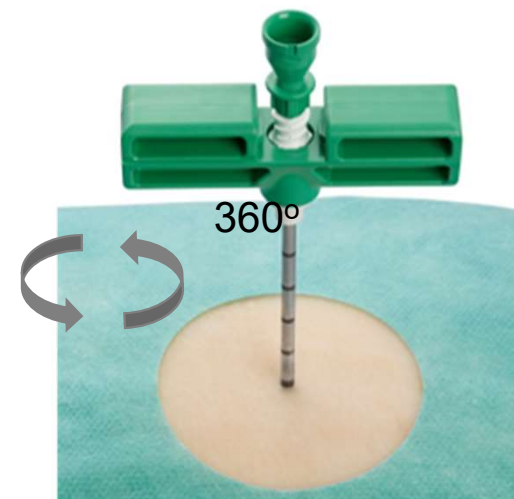

8. Wyjąć kaniulę ekstrakcyjną Tweezer®. Aby usunąć próbkę z kaniuli, włóż oznaczony obturator/sondę do lejkowatego końca pęsety Tweezer® delikatnie wypychając próbkę.